



IREDEEM CONTROLSYOU

SISTEMA DI TELECONTROLLO PER DAE PHILIPS



IL SISTEMA IREDEEM CONTROLSYOU

Per le reti di DAE PHILIPS



**Monitoraggio
24/7
dello stato di
operatività del DAE**



**Allertamento
automatico e
chiamata di soccorso**
al servizio di
emergenza medica



**Telefonata
vivavoce**
dal servizio di
emergenza
al soccorritore



**Geolocalizzazione
GPS**
posizione del DAE
e spostamento
durante l'emergenza

assicura
operatività, manutenzione e monitoraggio
delle reti di DAE

COME FUNZIONA

Integrazione tra Componente hardware e Controllo centrale



DAE con ControlsYou

Ogni DAE viene equipaggiato con una Componente hardware



SIM rete mobile

Le comunicazioni Voce, SMS e dati vengono inviate a mezzo Rete mobile



ControlsYou controllo centrale

Il Controllo centrale è disponibile per gli operatori della centrale di emergenza e per gli amministratori delle reti di DAE

Integrazione del sistema

COMPONENTE HARDWARE

È integrata nella valigetta del DAE Philips opportunamente adattata



Integrata nella
valigetta del DAE
Philips Heartstart HS1



Integrata nella
valigetta del DAE
Philips Heartstart FR3



Integrata nella valigetta del DAE
Philips Heartstart FRx

Anche i DAE Philips già installati possono essere facilmente aggiornati al sistema ControlsYou semplicemente sostituendo la valigetta standard con la valigetta ControlsYou

COMPONENTE HARDWARE STANDARD



COMPONENTE HARDWARE LIGHT



Sensore self status DAE

verifica 24/7
lo stato di operatività
del DAE



Accelerometro a 3 assi
per rilevare il movimento



Sensore a infrarossi
per rilevare l'apertura
della valigetta del DAE

NO CHIAMATA VIVAVOCE



Sensore GPS

per rilevare la
posizione del DAE e
lo spostamento
durante l'emergenza



Modulo SIM 4G

permette la
comunicazione
SMS e dati




Funzionamento a batteria autonoma

Indipendente dal DAE
1 anno di durata media
Facilmente sostituibile

NUOVA BATTERIA

NEW!

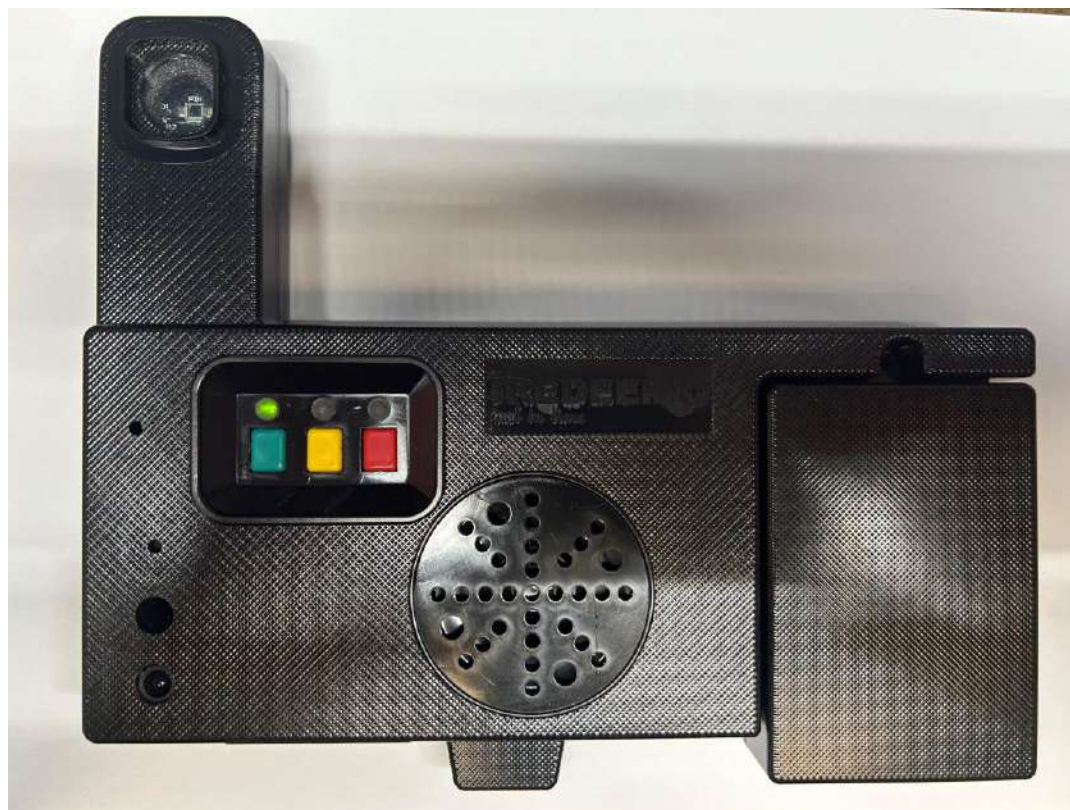

CONTROLLO CENTRALE CONTROLSYOU

Cruscotto principale rete dei DAE

Può essere integrata con il software della centrale di emergenza

Stato operatività dei DAE

Controllo 24/7 dello stato dei DAE

Data e orario

Ultimo check registrato del DAE

	ID Apparec	Codice Clie	Numero Sei	Numero Sei	Stato	Data Evento	Data Attiva	Descrizione	Scadenze	Indirizzo	Qualit	Data Coordinate	Latitudine	Longitudine
  	1041	133	301357	B17I-00605		01/07/2024	19/07/2018	Stato ok		Foro romano - bagni, Roma	8	01/07/2024 23:10	41.891720	12.485033
  	1042	133	301416	B17H-07544		01/07/2024	19/07/2018	Stato ok		Museo Palatino, Roma	8	01/07/2024 23:20	41.888336	12.486955
  	1140	133	301382	B17H-07504		01/07/2024	09/10/2018	Stato ok		Largo della Salara Vecchia, Roma	9	01/07/2024 23:07	41.892932	12.486817
  	1141	133	301361	B17H-07479		01/07/2024	16/10/2018	Stato ok		Foro Romano Orti Farnesiani, Rom	8	01/07/2024 23:32	41.889889	12.485457
  	1142	133	301478	B17H-07560		01/07/2024	16/10/2018	Stato ok		Foro Roma Palatino Arco di Tito, R	9	01/07/2024 22:51	41.890762	12.489277
  	1143	133	301588	B17I-00458		01/07/2024	09/10/2018	Stato ok		Foro Romano Porta San Gregorio,	9	01/07/2024 22:34	41.887920	12.489968
  	3154	133	303620	B16B-03210		01/07/2024	03/10/2019	Stato ok		Colosseo Biglietteria, Roma		Posizione Alloggia	41.890930	12.492401
  	3155	133	303390	B16B-03105		01/07/2024	03/10/2019	Stato ok		Colosseo Ufficio Coordinatori, Rom		Posizione Alloggia	41.890537	12.491988
  	3156	133	303462	B19E-03130		02/07/2024	03/10/2019	Stato ok		Colosseo P1 Ascensori, Roma		Posizione Alloggia	41.889805	12.493136
  	3157	133	303828	B16B-02752		01/07/2024	03/10/2019	Stato ok		Colosseo P1 Book Shop, Roma		Posizione Alloggia	41.890766	12.491682

20 1 Pagina di 1 You are viewing items from 1 to 14 by 14

ID DAE, ID Cliente , ID ControlsYou


Posizione DAE
Indirizzo registrato

Posizione GPS del DAE
Latitudine e longitudine

CONTROLLO CENTRALE CONTROLSYOU


Mappa rete dei DAE: stato operativo (cuore verde) e posizione in realtime

- nell'esempio la rete di DAE della metropolitana di Milano: 151 DAE ControlsYou monitorati -

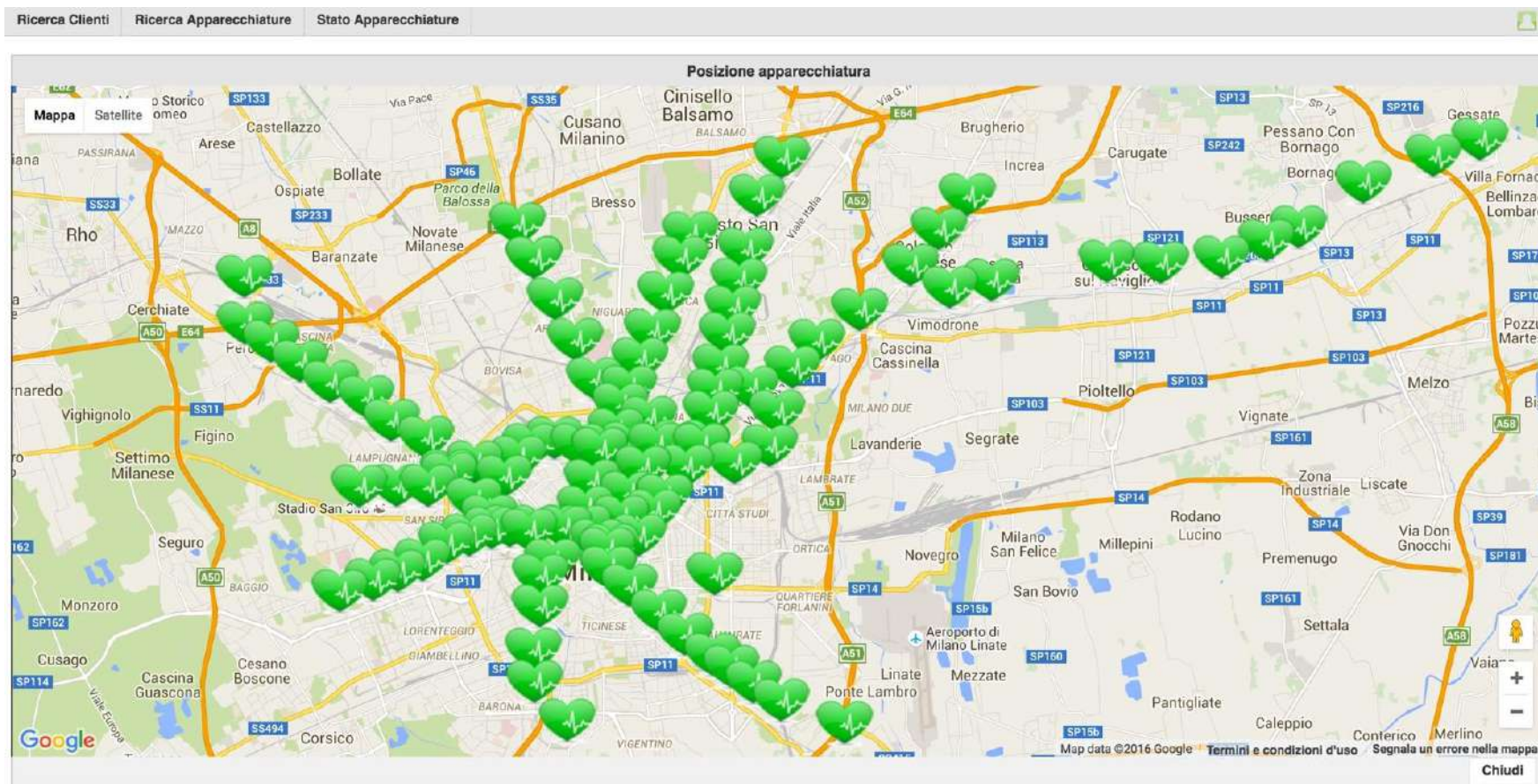

CONTROLLO CENTRALE CONTROLSYOU

In caso di una emergenza: posizione del DAE/soccorritore (cuore rosso)

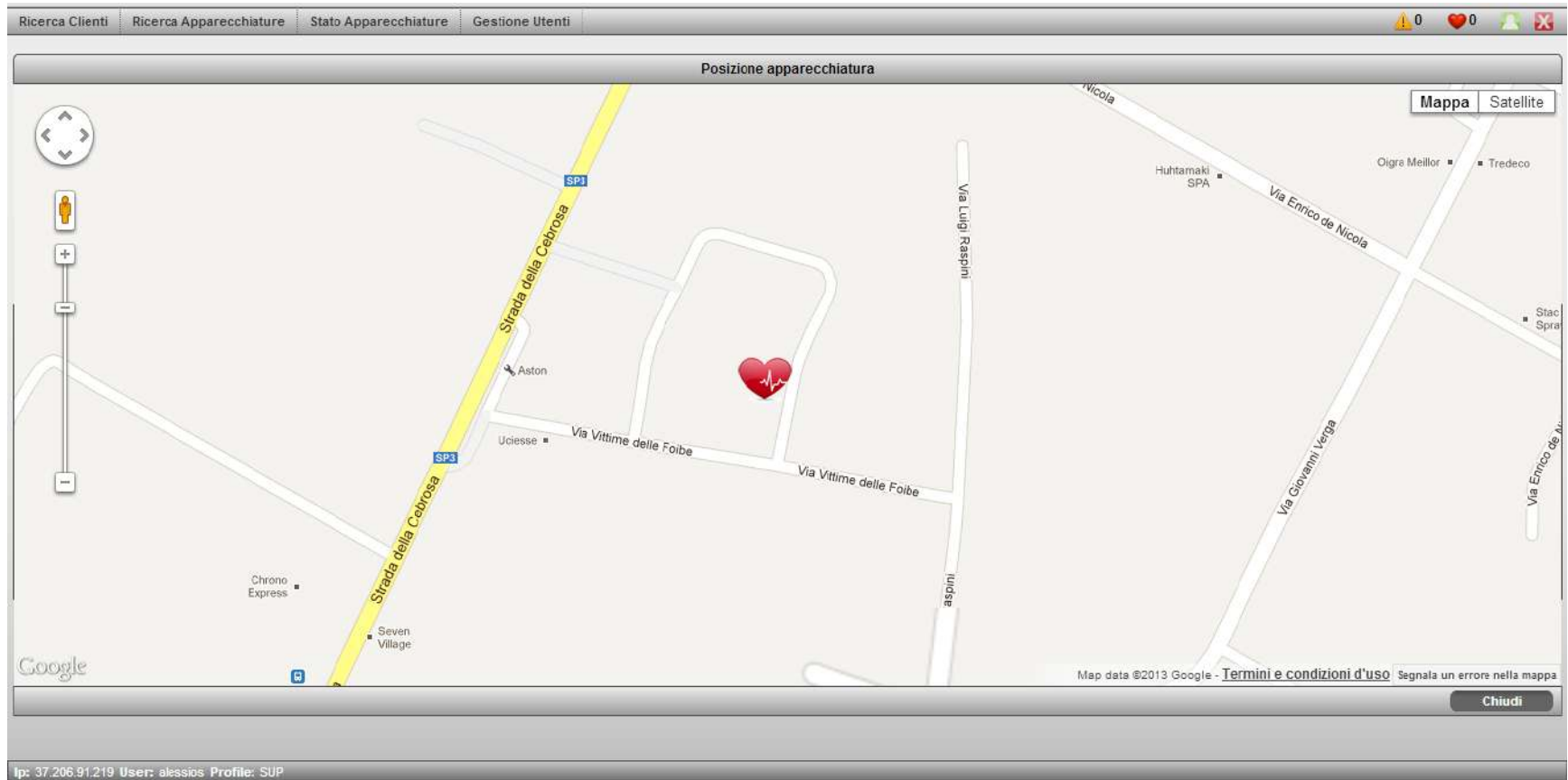

L'hardware ControlsYou dentro la valigetta del DAE **rileva il movimento** del DAE e/o **l'apertura della valigetta** e allerta la centrale. L'operatore della centrale **può effettuare una chiamata vivavoce** al DAE/soccorritore. La **posizione GPS** viene **aggiornata** ogni 30 secondi.

CONTROLLO CENTRALE CONTROLSYOU

Lista allarmi

Gestione Errori Apparecchiature

Colore:	Descrizione:	Telefono:	E-Mail:
	Stato ok		
	Offline		
	Rete Assente		domenico.giordano@ired deem.it; service@ired deem.it
	Batteria elettrodi pediatrici scaduti		domenico.giordano@ired deem.it; telecontrolli@ired deem.it
	DAE guasto		domenico.giordano@ired deem.it
	Batteria scaduta		domenico.giordano@ired deem.it; telecontrolli@ired deem.it
	DAE in uso	3441855744	domenico.giordano@ired deem.it
	Traccia DAE		
	Elettrodi scaduti		telecontrolli@ired deem.it
	Elettrodi in scadenza		telecontrolli@ired deem.it
	Elettrodi pediatrici in scadenza		domenico.giordano@ired deem.it; telecontrolli@ired deem.it
	Batteria in scadenza		domenico.giordano@ired deem.it; telecontrolli@ired deem.it
	Contratto Scaduto		domenico.giordano@ired deem.it; service@ired deem.it; telecontrolli@ired deem.it
	Batteria TC in scadenza		domenico.giordano@ired deem.it
	Contratto in Scadenza		domenico.giordano@ired deem.it; service@ired deem.it; telecontrolli@ired deem.it

Riporta Modifiche su:

Ogni **allarme** può essere **notificato** con SMS e/o email ad uno o più indirizzi

CONTROLLO CENTRALE CONTROLSYOU

Storico eventi DAE

Storico dello stato del DAE

Data e orario evento, posizione GPS

Lista eventi apparecchiatura

Stato:

Data Evento Da:

Data Evento A:

Esporta Risultati DAE In Uso Esporta Risultati Annulla Filtri Cerca

	Id Evento	ID Apparecchia	Codice Cliente	Numero Serie	Telecontrollo	Stato	Descrizione Stato	Data Evento	Posizione	utilizzo DAE	Esito utilizzo DAE	Mail
	5238482	271	94		304672		Stato ok	10/06/2024 12:0	GPS Non Aggiornabile	No		
	5238472	271	94		304672		DAE in uso	10/06/2024 12:0	GPS Non Aggiornabile	No		
	5238469	271	94		304672		DAE in uso	10/06/2024 12:0	GPS Non Aggiornabile	No		
	5238467	271	94		304672		DAE in uso	10/06/2024 12:0	GPS Non Aggiornabile	No		
	5238463	271	94		304672		DAE in uso	10/06/2024 11:5	GPS Non Aggiornabile	No		
	5238436	271	94		304672		Stato ok	10/06/2024 11:4	GPS Non Aggiornabile	No		
	5238427	271	94		304672		Traccia DAE	10/06/2024 11:4	GPS Non Aggiornabile	No		
	5238421	271	94		304672		Traccia DAE	10/06/2024 11:4	GPS Non Aggiornabile	No		
	5238419	271	94		304672		Traccia DAE	10/06/2024 11:4	44.5017,11.3401	No		

20 1 Pagina di 17 You are viewing items from 1 to 20 by 335

ID DAE, ID Cliente , ID ControlsYou

Notifica inviata alert DAE

CONTROLLO CENTRALE CONTROLSYOU

Storico interventi tecnici

Descrizione evento

Data intervento

<

CONTROLLO CENTRALE CONTROLS



Riepilogo settimanale sullo stato dei DAE

Ricerca Clienti Ricerca Apparecchiature Stato Apparecchiature Copia Dati Gestione Utenti Log Apparecchiature

Anagrafica Clienti CONSORZIO CENTRO BORGO

Ragione Sociale: CONSORZIO CENTRO BORGO Indirizzo: VIA M. EMILIO LEPIDO 14
Comune: Bologna CAP: 40132
Provincia: BO Codice Fiscale: 02790581207
Partita IVA: 02790581207 Telefono: 051406965
Fax: Distributore associato: Seleziona
Distributore: ☐ Mail riassunto: direzione@centroborgo.it

Flag riassunto Settimanale: ☒ Lingua per SMS/Email: it

Salva Chiudi

Configurazione Per Report Settimanale

-	↑	↓	Colonna:	Modello
-	↑	↓	Colonna:	Numero Serie DAE
-	↑	↓	Colonna:	Stato
-	↑	↓	Colonna:	Data Aggiornamento Posizione
-	↑	↓	Colonna:	Scadenza Batteria DAE
-	↑	↓	Colonna:	Scadenza Elettrodi
-	↑	↓	Colonna:	Indirizzo
-	↑	↓	Colonna:	Città

+ Aggiungi Colonna Salva Chiudi

Destinatario del
riassunto via PEC

PERSONALIZZAZIONE DEL FILE EXCEL DI RIASSUNTO
DA INVIARE

CONTROLS YOU STANDARD VS LIGHT

	CONTROLS YOU STANDARD	CONTROLS YOU LIGHT
Sensore self status DAE		
Sensore accelerometro		
Sensore infrarosso		
Sensore GPS		
Batteria autonoma		
Invio mail/SMS alert		
Invio PEC con report settimanale		
Chiamata vivavoce		
Modulo SIM 4G		

I VANTAGGI DI CONTROLSYOU



DAE con ControlsYou componente hardware

- Completamente autonomo, senza bisogno di alimentazione esterna o rete dati cablata
- Batteria autonoma, indipendente dal DAE
- Anche i DAE Philips esistenti possono essere facilmente aggiornati sostituendo solo la valigetta
- Può essere utilizzato su DAE a posizionamento fisso
- Può essere usato su DAE mobili (es: auto polizia, ambulanza, ecc.)



Voce, SMS e dati vengono scambiati utilizzando una SIM di rete mobile

- Il sistema 2G/4G è una piattaforma altamente affidabile diffusa a livello mondiale
- Ottima copertura del segnale nel territorio grazie alla molteplicità di operatori
- L'impiego della SIM rende possibile l'impiego in mobilità, svincolato da reti cablate, la comunicazione è possibile ovunque
- Alta resilienza in caso di segnale scarso: il sistema può commutare da 2G/4G a SMS



ControlsYou Controllo centrale

- Integrabile nel software di centrale
- Monitoraggio stato di operatività della rete di DAE
- Monitoraggio posizionamenti delle rete di DAE
- Scadenziario della manutenzione
- Sorveglianza della rete di DAE
- Allarme rapido del sistema in caso di emergenza
- Rapida localizzazione geografica dell'emergenza
- Rapido instradamento dei soccorsi

Grazie per l'attenzione